

NOTICE ABRÉGÉE

Mise en service de l'appareil thérapeutique HILOTHERM *Clinic*
Remplissage d'eau, purge
Branchement et débranchement des manchons et flexibles

Première mise en service / Mise en service après changement d'eau

1. Remplissage d'eau sur l'appareil désactivé.



Ajouter deux litres d'eau distillée.

Le niveau d'eau doit toujours être entre min. et max.

2. Purge du circuit d'eau.



Placez la seringue de purge au niveau d'un des deux couplages avant jusqu'à ce que son enclenchement soit audible. Tirez la seringue jusqu'à ce que l'eau soit extraite. Éjectez simplement l'eau recueillie hors de la seringue dans le réservoir d'eau.

Démarrer l'appareil, brancher les flexibles et manchons

1. Démarrer l'interrupteur principal à l'arrière de l'appareil.
2. Coupler les flexibles



Brancher les douilles dans les raccords sur un côté. Peu importe celui qui se branche à l'avant ou à l'arrière. Les raccords doivent s'enclencher. Au besoin, coupez le deuxième flexible de l'autre côté.

3. Régler la température.



Sélectionner la température de consigne souhaitée à l'aide des touches fléchées sous les symboles + et -.

S'il y a une différence de plus de 5 °C entre la température souhaitée (théorique) et la température réelle, appuyer une fois sur START, mais attendez quelques minutes avant de commencer l'application d'hilothérapie ou de poser les manchons afin que la température réelle soit à moins de 5 °C de la température théorique ou que les deux températures correspondent.

La température peut également être modifiée à tout moment pendant le fonctionnement.


Démarrer et arrêter l'utilisation

1. Démarrer/arrêter le fonctionnement, remplir/vider les manchons.



Pour démarrer l'utilisation et pour remplir les manchons, appuyer sur la touche située sous START. Pour arrêter le fonctionnement, appuyer sur la touche située sous STOP.

2. Arrêter l'utilisation. Débrancher les flexibles.

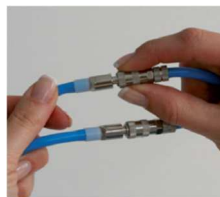

Après avoir appuyé sur la touche STOP, les flexibles peuvent être débranchés. Enfoncer à cet effet l'anneau du raccord, la douille se détache alors du raccord.

Attention : Lors du débranchement des flexibles, de l'eau peut sortir. Le flexible doit uniquement être débranché lorsque l'appareil est à l'arrêt.