



ELpha II 1000 zur „Tibialis- oder Sakral Stimulation“ Neuromodulation

Programm 0 beidseitig


Behandlung täglich 30 Minuten für 4 – 12 Wochen !

Einstellungen:	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	200 uS
	Behandlungszeit	30 Minuten

Einstellen Programm 1 falls noch nicht im Display sichtbar:


- * Einschalttaste (1) drücken
- * Programmtaste (2 oder 4) drücken bis P0 im Display
- * Stimulation Tibialisnerv an beiden Fussknochen

Stimulation Sakrum S2 / S3

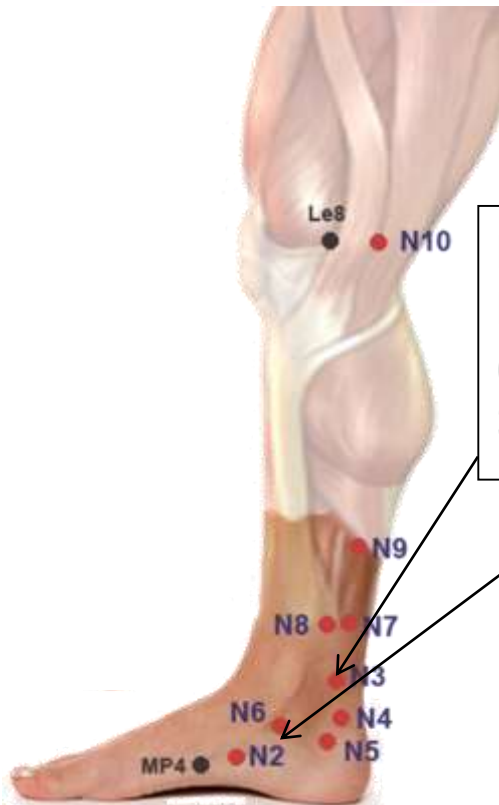

Platzierung auf N3
Pals platinum 25 mm
oder Pals ValuTrode
32 mm

Beim aufdrehen des Stroms, Plantarflexion der grossen Zehe.
Strom retour bis keine Kontraktion mehr da ist.

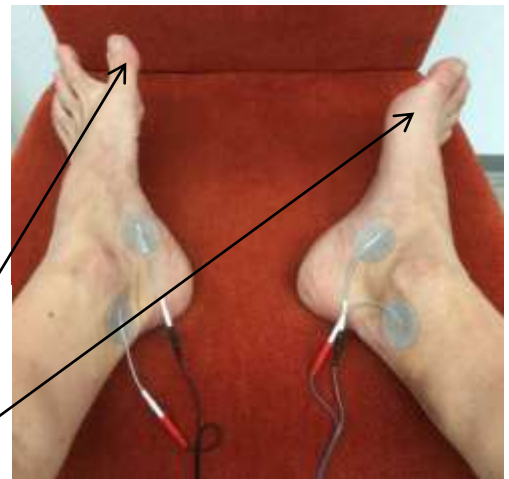

Angenehmes Kribbeln.



Elpha II 1000 zur „Tibialis- oder Sakral Stimulation“ Neuromodulation


Programm 0 beidseitig

Behandlung täglich 30 Minuten für 4 – 12 Wochen !

Einstellungen:	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	200 uS
	Behandlungszeit	30 Minuten


Einstellen Programm 1 falls noch nicht im Display sichtbar:

- * Einschalttaste (1) drücken
- * Programmtaste (2 oder 4) drücken bis P0 im Display
- * Stimulation Tibialisnerv an beiden Fussknochen
- Stimulation Sakrum S2 / S3

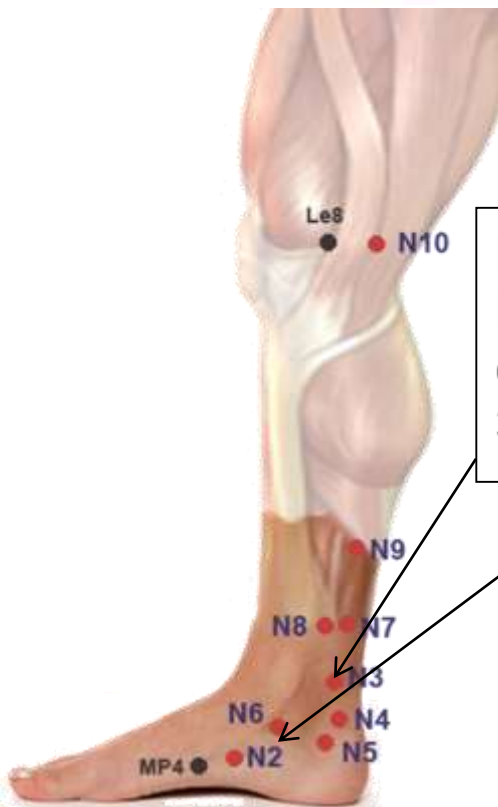

Platzierung auf N3
Pals platinum 25 mm
oder Pals ValuTrode
32 mm

Beim aufdrehen des Stroms, Plantarflexion der grossen Zehe.
Strom retour bis keine Kontraktion mehr da ist.

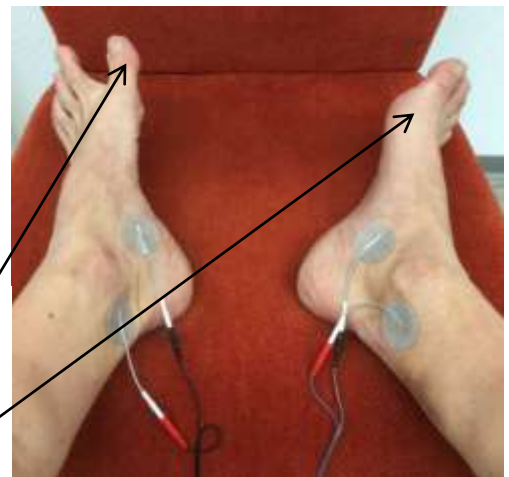

Angenehmes Kribbeln.